



Järven Health Care



JÄRVEN HJÄRTBRÄDA

Bruksanvisning

Rev. 23.12.00-SE

Tack till ditt val av Järven Hjärtbräda. Vårt mål är att du ska bli nöjd med produkten både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning för att på bästa sätt hantera din produkt.

Har du några frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

Denna bruksanvisning innehåller information om användning, underhåll och säkerhet. Det är därför viktigt att du läst och förstått informationen för ett tryggt användande med bästa möjliga funktion.

Ett korrekt handhavande förlänger även produktens livslängd.

Vårdgivare ska ha fått relevant utbildning samt ges tillgång till denna **bruksanvisning**.

Under inga omständigheter får Hjärtbrädan modifieras utan skriftligt tillstånd från Järven Health Care.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	3
Varnings- och informationsrutor	4
Viktiga säkerhetsföreskrifter	4
Innan användning	5
Innan användning	5
Avsedd användning	6
Kontraindikationer	6
Försiktighetsåtgärder	6
Föväntad livslängd	6
Vid vård i hemmet	7
Skötsel och rengöring	8
Förvaring	8
Övrigt	9
Produktansvar	9
Returer och reklamationer	9
Transportskador	9
Återvinning	9
Kvalitet	10
Märkning	10
Bruksanvisningen gäller följande produkter	10
Produktinformation	10
Etikett	11



VARNINGS- OCH INFORMATIONSRUTOR

Denna bruksanvisning innehåller information om användning, underhåll och säkerhet. Det är därför viktigt att du läst och förstått informationen för ett tryggt användande. Ett korrekt handhavande förlänger även produktens livslängd.

Vårdgivare ska ha fått relevant utbildning samt ges tillgång till denna bruksanvisning.

Under inga omständigheter får utrustningen modifieras utan skriftligt tillstånd från Järven Health Care.

Genomgående i denna bruksanvisning används rutor för att lyfta information av säkerhetskaraktär eller som är viktiga för produktens funktion och prestanda.

Nedan exemplifieras dessa.



Varningsruta som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara. Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

Informationsruta med anvisningar som, om de inte följs, kan skada produkten och/eller försämra systemets funktion och prestanda.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Produkten ska bara användas i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Produkten ska inte kombineras, monteras eller repareras..
- Undvik att använda vassa föremål i närheten av produkten.
- För att undvika skador får inte produkten komma i kontakt med varma källor eller eld, till exempel glödande/brinnande cigaretter, varma lampor eller liknande.

INNAN ANVÄNDNING

Mottagande och uppackning

Järven Hjärtbräda levereras i kartong. Kniv eller vassa föremål får inte användas vid uppackning och hantering på grund av risk för skador på produkten.

Börja med att kontrollera att förpackningen inte har skadats.

Kontrollera sedan förpackningens innehåll.

Läs igenom denna bruksanvisning. Bruksanvisningen skall förvaras lättillgängligt på en plats alla som skall jobba med produkten känner till.

Vi uppmanar att emballaget källsorteras för minskad miljöpåverkan.



Om Järven Hjärtbräda används med andra medicintekniska produkter är det vårdgivarens ansvar att säkerhets- och överensstämelsekrav uppfylls.



Du måste ha läst och förstått denna bruksanvisning innan du använder produkten. Detta gäller även vid vård i hemmet.

Vid allvarliga tillbud som inträffar i samband med produkten ska detta omgående rapporteras till Järven Health Care och behörig myndighet.

AVSEDD ANVÄNDNING

Järven Hjärtbräda är en slagtålig och hygienisk hjärtbräda tillverkad i hårdplast utvecklad i nära samarbete med erfaren HLR (Hjärt-Lung-Räddning)-personal. Hjärtbrädan placeras mellan patient och madrass för att skapa ett hårt underlag vid HLR (hjärt och lungräddning).

Järven Hjärtbräda an användas i följande miljöer, definierade i standard IEC 60601-2-52

- Användningsmiljö 1 (akutvård).
- Användningsmiljö 2 (korttidsvård på sjukhus eller andra sjukvårdsinrättningar).
- Användningsmiljö 3 (långtidsvård på sjukvårdsinrättningar).
- Användningsmiljö 4 (vård i hemmiljö).
- Användningsmiljö 5 (poliklinikpatienter eller öppenvård).

Kontraindikationer

Järven Hjärtbräda får inte:

- användas om personalen inte är utbildad i HLR
- placeras permanent under patient då sjukvårdsmadrassens tryckavlastande egenskaper omintetgörs.

Försiktighetsåtgärder

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs

Förväntad livslängd

Följ alltid våra skötselråd för längsta möjliga livslängd med bibehållen funktion. Förväntad livslängd är 5 år.

VID VÅRD I HEMMET

Innan Järven Hjärtbräda placeras i hemmiljö måste den personal eller anhörig som skall hantera Hjärtbrädan, läst och förstått bruksanvisningen samt fått relevant utbildning av utbildad personal.

Övriga säkerhetsaspekter som denna bruksanvisning tar upp gäller även vid hemvård.

Att tänka på vid vård i hemmiljö

I samband med placering av Hjärtbrädan i hemmet måste särskild hänsyn tas till:

- Att inga obehöriga hanterar Hjärtbrädan.
- Att bruksanvisning finns tillgänglig.



SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- Kontrollera regelbundet hjärtbrädan för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis sprickor, hål eller andra skador.
- Rengöring sker med tvålbaserade rengöringsmedel. Se till att använda rekommenderade spädningförhållanden för rengöringsmedlet. Använd aldrig koncentrat.
- Klorhaltiga preparat får ej användas!
- Desinficering sker med alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider.



**Vid användning av rengöringsmedel eller andra kemikalier är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för respektive rengöringsmedel.
Se säkerhetsdata blad för de rengöringsmedel som används.**

FÖRVARING

Förvara Järven Hjärtbräda i torra, rumstempererade lokaler. Undvik direkt solljus.

ÖVRIGT

PRODUKTANSVAR

Med produktansvar avses tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18) fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar för eventuella skador som produkten orsakat. Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egendoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

RETURER OCH REKLAMATIONER

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklamationsärende ske enligt våra instruktioner. Returneras produkt innan reklamationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

TRANSPORTSKADOR

Transportskada skall noteras på fraktsedeln innan påskrift för att vara giltig. Därefter kontaktar ni kundtjänst på Järven Health Care (0660-22 28 50, healthcare@jarven.se) och lämnar relevant information.

OBS! För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

ÅTERVINNING

Järven Hjärtbräda är helt energiåtervinningsbart och skall sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

KVALITET

CE-MÄRKNING

Järven Hjärtbräda är CE-märkt enligt MDR 2017/745. Detta innebär att Järven Health Care har tillverkaransvaret och försäkrar att produkten uppfyller de väsentliga kraven samt att det finns teknisk dokumentation och försäkran som bevaras i minst tio år.

KVALITETSARBETE

Vårt kvalitetsarbete och kundfokus förverkligas genom att vara lyhörd för våra kunders behov och förväntningar samt i alla avseenden verka för ett samarbete som bygger på långsiktighet och förtroende. Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden till vår förmåga att tillfredsställa kunderna i dag och i framtiden. I vårt grundläggande kvalitetsarbete ingår också att finna utvärderingsmetoder och standarder som erbjuder kunden en säkerställd kvalitet gällande komfort, funktion, hållbarhet och pris.

Järven Health Care fokuserar särskilt på att genom kompetenta och engagerade medarbetare kontinuerligt fortbilda och kompetensutveckla vårdens personal. Det är vår förhoppning att det ska leda till att de genom rätt produktval kan bedriva en högkvalitativ vård med inriktning på att förebygga trycksår, vårdrelaterade infektioner och minska bränder som uppkommer i vården.

BRUKSANVISNINGEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER

Järven Hjärtbräda

PRODUKTINFORMATION


Järven Hjärtbräda

Järven Hjärtbräda placeras mellan patient och madrass för att skapa ett hårt underlag vid HLR (hjärt och lungräddning).

MÄRKNING

ETIKETT

Nedan följer exempel på produktens märkning. Etikettens utseende kan variera.

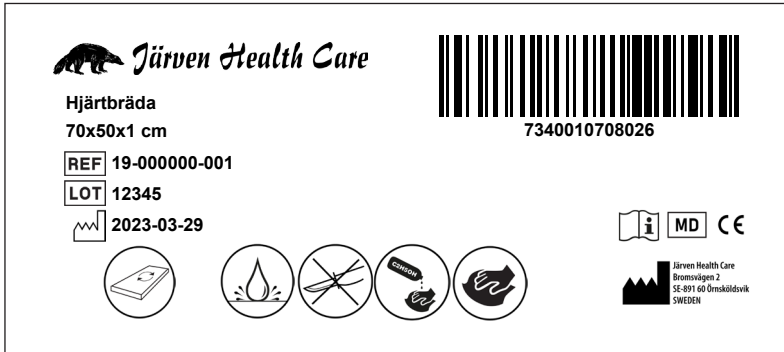

SYMBOLER



Anger artikelnummer



Anger batchnummer



Produkten är en medicinteknisk produkt



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med medicintekniskt direktiv, 93/42/EEC (Klass 1)



Läs bruksanvisningen innan användning



Anger tillverkningsdatum




Anger tillverkare



Får vändas och roteras



Vätskeavvisande

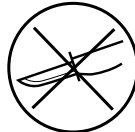

Vassa föremål bör undvikas



Kan desinficeras med alkoholbaserade tensider



Kan torkas av med fuktig trasa



Bruksanvisning för Järven Hjärtbräda.

Alla varumärken tillhör respektive ägare. Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

**Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten**



Järven AB, Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Telefon: 0660-22 28 50
Telefax: 0660-824 10
E-post: healthcare@jarven.se

www.jarven.se