



MELISSA PARAD

Förebyggande sjukvårdsmadrass med utmärkt tryckutjämning och hög komfort

Melissa Parad är en sjukvårdsmadrass i Melissa-serien. Den är utvecklad för att vara en del i den dagliga vården av patienter. Madrassen är utvecklad för behandling av trycksår upp till och med kategori 3. Det dokumenterat låga trycket är avlastande för utstickande kroppsdelar som axlar och hälar.

- **NOGA SAMMANSATT SKUMKÄRNA.** Melissa Parad är en 2-skiktsmadrass med noga utvalda skumkvaliteter för komfort och god tryckavlasning.
- **UPP TILL OCH MED SÅRKATEGORI 3.** Melissa Parad är utvecklad som ett hjälpmedel vid behandling av patienter med trycksår upp till och med sårkategori 3.
- **TRE VALBARA VÄTSKETÄTA ÖVERDRAG.** Våra prasselfria RX-överdrag är vätsketäta för att förhindra blod och andra kroppsvätskor att tränga in till madrassens skumkärna.
 - RX-5 Basöverdrag
 - RXH-5 Med handtag för förflyttning av madrass
 - RXI-5 Med handtag och evakueringsfunktion



MELISSA PARAD

UTVECKLAD FÖR HÖG KOMFORT OCH MYCKET GOD TRYCKAVLASTNING.

Vätsketätt överdrag med goda egenskaper


Melissa Parad levereras med ett överdrag ur RX-serien. En serie överdrag tillverkade av 2-stretchig poluretanväv som både är ånggenomsläpplig och prasselfri. Överdraget har dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI-5) för att underlätta den dagliga skötseln av madrassen. Samtliga dragkedjor har droppkant.

Melissa Parad erbjuder mycket god tryckavlastning

Skumkärnan består av två lager med noga utvalda skumtyper. Tillsammans med vårt RX-överdrag ger detta förut sättningar för en mycket god tryckavlastning. Med ett dokumenterat lågt tryck (39 mm/Hg) för utstickande kroppsdelar, såsom hälar och skuldror, krävs ingen separat hälzon.

Melissa Parad erbjuder sittfunktion

Madrassen har genomgått utmattningstest enligt standard SS 876 00 11 med goda resultat. Madrassen erbjuder därigenom sittfunktion med höjt ryggläge i säng.

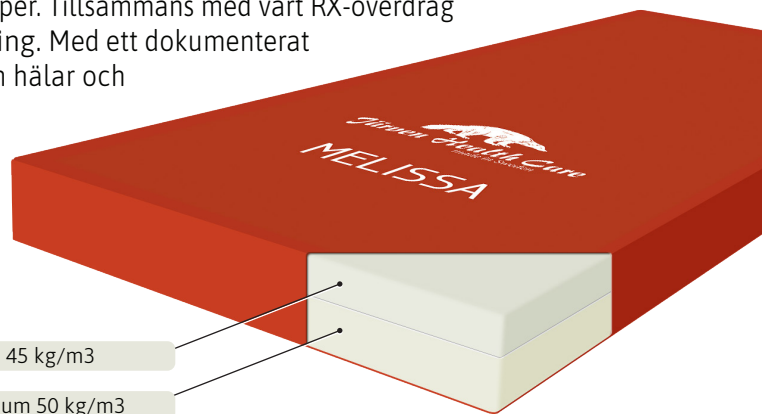

6 cm hypersoft skum 45 kg/m³

8 cm höglastiskt kallskum 50 kg/m³

STANDARD FÖR OBJEKTIV UTVÄRDERING AV MADRASSERS TRYCKAVLASTANDE EGENSKAPER.

För att få en objektiv bedömning av madrassers tryckavlastande egenskaper har RISE utvecklat en standard där man med intryckskroppar mäter det faktiska mottrycket i en madrass. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard SS 876 00 13.

Melissa Parad har testats av RISE enligt mätmetod SS 876 00 13 och är tryckavlastande till och med sårkategori 3.

Testresultatet redovisas nedan.

Belastning	Extra låg	Låg	Medel	Hög
Stor intryckskropp 300 N	< 30,0	30,0 - 34,9	35,0 - 39,9	40,0 - 44,9
Stor intryckskropp 600 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9
Liten intryckskropp 40 N	< 45,0	45,0 - 52,9	53,0 - 60,9	61,0 - 68,9

Madras	Stor intryckskropp 300 N	Stor intryckskropp 600 N	Liten intryckskropp 40 N
Melissa Parad	24	47	39

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Material	6 cm hypersoft skum 45 kg/m ³ 8 cm höglastiskt kallskum 50 kg/m ³ ,
Storlekar	200/205/210 x 80/85/90/105/120 x 14 cm (För andra storlekar kontakta Järven Health Care.)
Sårkategori	Till och med kategori 3
Madrasvikt	ca 11 kg beroende på längd och bredd

Brukarvikt	Upp till och med 180 kg.
Brand	SS 87600 01, normalrisk (testmetod EN 597-1 & 2)
Återvinning	Madras med överdrag är helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall. Demontering krävs ej.
Märkning	Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselansvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.



Järven Health Care

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN
Telefon: 0660 - 22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10
www.jarven.se | healthcare@jarven.se