


Bruksanvisning

Magma Plus

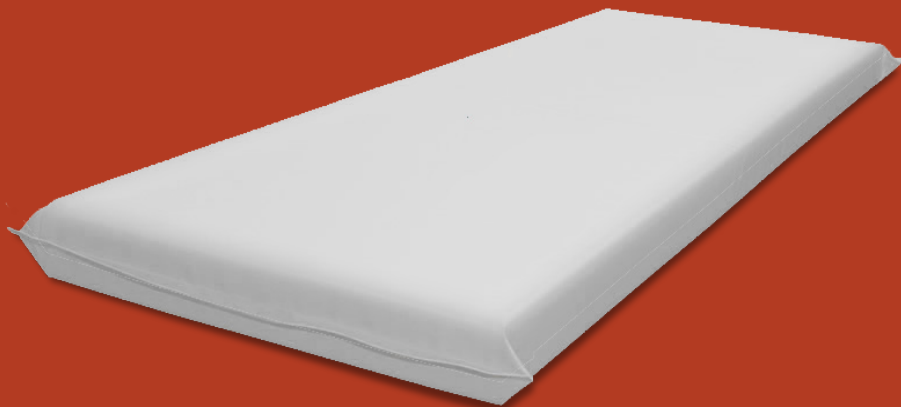

Järven Health Care

Tack till ditt val av Magma Plus vårdmadrass. Vårt mål är att du ska bli nöjd med madrassen både vad gäller funktion och livslängd. Vi ber dig därför att ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvisning för att på bästa sätt hantera din madrass.

Har du frågor som inte berörs i denna bruksanvisning ber vi dig att ta kontakt med oss på Järven Health Care. Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av denna bruksanvisning.

Varnings- och informationsrutor



Varningsruta som informerar om en viktig säkerhetsaspekt eller fara. Om du inte förstår eller följer informationen kan du skada dig själv eller andra!

Informationsruta med anvisningar som, om de inte följs, kan skada och/eller försämra produkten.

CE-märkning

Järven Health Cares madrasser och överdrag är CE-märkta enligt den medicintekniska förordningen MDR (EU) 2017/745 klass 1. CE-märkningen innebär att Järven Health Care har tillverkarens ansvar för att säkerställa att denna produkt uppfyller de väsentliga kraven i relevant europeisk lagstiftning. Detta inkluderar tillhandahållande av teknisk dokumentation och försäkran som upprätthålls i minst tio år efter att produkten har släppts ut på marknaden.

Försäkran om överensstämmelse med väsentliga krav har lämnats in till Läkemedelsverket i Sverige.

Vårt kvalitetsarbete

Våra kvalitetsstandarder och mål för kundfokus förverkligas genom att vi svarar upp mot våra kunders behov och förväntningar. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer genom samarbete och förtroende. Ständiga förbättringar av våra produkter och tjänster är grunden för vår förmåga att tillfredsställa både nuvarande och framtida kunder. I vårt arbetssätt ingår att utveckla utvärderingsmetoder och standarder som ger kunden en garanterad kvalitet när det gäller komfort, funktion, hållbarhet och pris. Genom vårt team av kompetenta och engagerade medarbetare fokuserar vi på att stödja utbildning, utveckling och innovation inom vården. Våra mål är att underlätta vård av hög kvalitet för att förebygga trycksår, minska vårdrelaterade infektioner och förbättra brandsäkerheten i vårdmiljöer.

Om du behöver ytterligare information eller hjälp är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: +46 660-22 28 50
E-post: healthcare@jarven.se
Webb: www.jarven.se

Järven Health Care
Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik, SWEDEN

Innehållsförteckning

Introduktion	2
Varnings- och informationsrutor	2
CE-märkning.....	2
Vårt kvalitetsarbete.....	2
Innehållsförteckning	3
Säkerhetsföreskrifter	4
Produktinformation och brandstandarder.....	4
Mottagande och uppackning av produkten	5
Avsedd användning.....	5
Rengöring av madrass	5
Förvaring.....	5
Återvinning och deponi.....	5
Produktansvar	6
Returer och reklamationer	6
Transportskador	6

Säkerhetsföreskrifter.



Läs följande information innan du använder din Magma Plus madrass!

- Produkten får endast användas i enlighet med denna användarhandbok.
- Produktens skall optiskt bedömas innan och efter varje användning.
- Vid skada på ytskikt skall produkten kasseras för att minimera eventuell risk för smittspridning.
- Produkten får inte monteras, modifieras eller repareras på annat sätt än som beskrivs i denna bruksanvisning eller i annan dokumentation från Järven Health Care.
- Se till att madrassen inte blir missformad eller skadad under förvaringen.
- Undvik vassa föremål i närheten av madrassen så att ytan inte skadas.
- Det är kundens ansvar att göra en brandriskbedömning av den avsedda användningsmiljön. Kontakta oss gärna om du har några frågor.
- Se till att du använder rätt madrassstorlek för sängen och rätt modell för patienten.
- Bär inte patienten på madrassen!

Vid allvarliga tillbud som inträffar i samband med produkten ska detta omgående rapporteras till Järven Health Care och behörig myndighet.

Produktinformation och brandstandarder

Magma uppfyller SS 876 00 10:2016 vilket motsvarar NT-Fire 055, en av de tuffaste testmetoderna för madrasskärnor. Madrassen passar därför särskilt bra för miljöer där man ställer extra höga brandkrav såsom; häkten, arrester, psykiatriska kliniker och behandlingshem.

Madrassen har även hög rivstyrka för att försvåra för patienter med självskaðebeteende eller som har suicidala tendenser.

Mottagande och uppackning av produkten

Ta bort förpackningen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv eller annat vasst föremål bör undvikas vid hantering av förpackningen och produkten. Kontrollera att produkten inte är skadad. Vid eventuell transportskada eller anmärkning på produkten, se sidan 6.

Avsedd användning

Magma Plus är framtagen för extremt krävande och brandfarliga miljöer. Den lämpar sig väl för användning inom sektorer som fängelseceller, avvänjningskliniker, psykiatriska avdelningar med mera.

Magma Plus kan användas direkt efter uppackning.

Rengöring av madrass

Den helt vattentäta madrassen kan rengöras med tvålbaseade rengöringsmedel. Använda rekommenderade spädningsförhållanden för rengöringsmedlet. **Använd aldrig koncentrat!**

Madrassen torkas torr med trasa.

Vid desinficering används alkoholbaserat rengöringsmedel med tensider.

Om hygienöverdraget är skadat kan kroppsvätskor m.m tränga ned i madrasskärnan och leda till bakterieansamlingar. **En madrass med skadat överdrag måste därför kasseras omgående.!**

En inspektionsplan för revision av produkten bör därför upprättas. Kontrollera regelbundet madrassen för synliga tecken på skador eller slitage, exempelvis revor, sprickor, hål, fläckar eller missfärgning.

Kontrollera madrassens alla sidor.



Vid rengöring är det viktigt att beakta de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som finns för de rengöringsmedel som används!



Madrasser med skadade överdrag måste omedelbart kasseras för att inte riskera bakterieansamlingar och därmed en ökad risk för VRI. Ett skadat överdrag påverkar även brandsäkerheten och överdragets rivstyrka negativt.

Förvaring

Magma Plus förvaras i torra och rumstempererade utrummen. Undvik direkt solljus.

Återvinning och deponi

Magma Plus är helt energiåtervinningsbar och sorteras som brännbart avfall. Ingen demontering är för att undvika att spridning av infektiner nödvändig bör madrassen desinficeras innan återvinning eller deponering. Lokala återvinningsföreskrifter skall efterföljas.

Produktansvar

Med produktansvar avses tillverkarens lagstadgade ansvar för eventuella skador som produkten orsakat enligt Produktansvarslagen (EU-direktiv 85/374/EEG, Svensk lag SFS 1992:18). Denna lag fastställer tillverkarens, importörens eller försäljarens lagstadgade skadeståndsansvar.

Reglerna gäller för fysiska produkter i form av lösa föremål men även för produkter som kopplas ihop med andra lösa föremål eller fast egendom. Finns det ingen produkt som orsakat någon form av egenoms- eller personskada är produktansvarslagstiftningen inte relevant.

Returer och reklamationer

Reklamationer skall skriftligen anmälas till Järven Health Care. Retur av produkt skall efter godkänt reklamerationsärende ske enligt våra instruktioner.


Retureras produkt innan reklamerationsärendet är godkänt räknas ärendet som avslutat och ersättning till kund betalas inte ut.

Transportskador

Eventuella transportskador skall noteras på fraktsedelns innan påskrift för att vara giltig. Ta därefter kontakta med Järven Health Cares (se sidan 2 eller Bruksanvisningens sista sida för kontaktuppgifter). För snabbare behandling av ditt ärende ber vi dig fotografera transportskadan så utförligt som möjligt innan ni kontaktar kundtjänst.

Märkning

Nedan följer exempel på madrassens märkning. Etiketternas utseende kan variera.

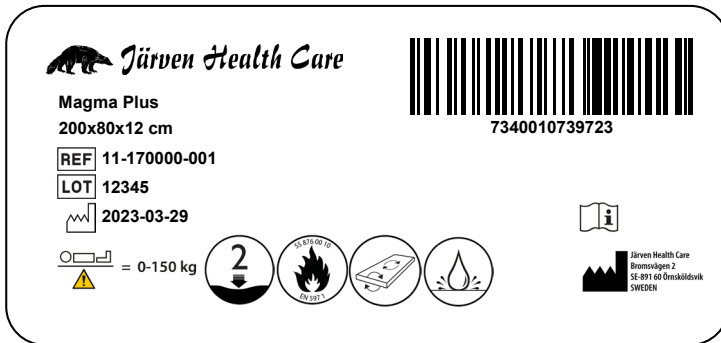

Symbolförklaring



Artikelnummer



Ordernummer



Anger att artikeln är en medicinteknisk produkt.




Anger att användaren måste läsa bruksanvisningen.




Anger uppgifter om tillverkaren



Produktionsdatum

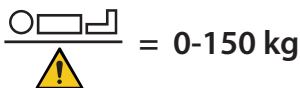


Anger max brukarvikt, 0-150 kg

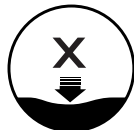

Anger upp till den sårkategori madrassen är anpassad för.



Madrassen har testats enligt SS 876 00 10:2016, testmetod NT-Fire 055 och EN 597-1 & 2.

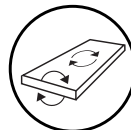

Madrassen är både vänd- och roterbar



Överdraget är vätskeavvisande



Magma Plus Bruksanvisning. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Järven AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna bruksanvisning vid behov och/eller påträffande av eventuella stav- eller faktafel.

**Ytterligare exemplar kan beställas från Järven Health Care.
Kopiering för internt bruk är tillåten**

 **Järven Health Care**



Bromsvägen 3
SE-891 60 Örnsköldsvik
SWEDEN

Tel: +46 660-22 28 50
Fax: +46 660-824 10
Email: healthcare@jarven.se

www.jarven.se